



VetPen®

Koiran ja kissan diabetes -opas omistajalle


Caninsulin VetPen - KÄYTTÖOHJEET

Lisäohjeita kohtaan G ja H (sivu 10)

On tärkeää poistaa **kaikki ilma** sylinteriampullista ennen käyttöä, jotta annoksen mukana ei injektoida ilmaa ja annos pysyy oikeana.

Pieni määrä insuliinia voi ilmestyä neulan kärkeen ennen kuin kaikki ilma on poistettu sylinteriampullista. Toista vaiheet G ja H, kunnes insuliinia selvästi tiputtelee tai ruiskahtaa neulan kärjestä. **Tämä voi vaatia monta toistoa.**

Varmista tarkastamalla sylinteriampullin ikkunasta, että kaikki ilma on poistunut toimenpiteen aikana. Insuliinikynä on nyt valmis käyttöönotettavaksi.

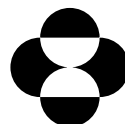

MSD

Animal Health